

joleti

- ▀ Spécialement conçu pour offrir au professionnel de la santé une aisance et une rapidité d'utilisation.
- ▀ Sa composition et sa conception lui assurent une longue durée de vie même en cas d'utilisation intensive.
- ▀ Sans latex.
- ▀ **Mode d'utilisation :**
 - ▀ Appuyer sur la boucle pour ouvrir.
 - ▀ Créer une boucle puis refermer.
 - ▀ Tirer sur la bande pour serrer et garrotter.
 - ▀ Appuyer sur l'arrière en tenant pour activer la stase.
- ▀ Dimensions : L. 45 cm x l. 25 mm.
- ▀ **Garantie : 1 an**



RÉFÉRENCE	COLORIS	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	SUR-CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE FOURNISSEUR
15 06 030 060	 Bleu marine	L. 45 cm x l. 25 mm	À l'unité	10	HS-403 BLUE
15 06 030 070	 Vert	L. 45 cm x l. 25 mm	À l'unité	10	HS-403 GREEN



Importateur /Distributeur :

La Centrale Médicale
ZI de la Petite Dimerie
15, rue du 11 Novembre
62310 FRUGES (FRANCE)



SHANGAI INTERNATIONAL HOLDING
Corp.GmbH.
Eiffestrasse 80
20537 HAMBURG (GERMANY)



WENZHOU HONSUN MEDICAL INSTRUMENT
CO. LTD.
WENZHOU (P.R. CHINA)