
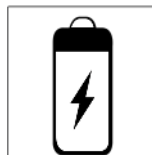


FAUTEUIL STARLEV'II

VHP à pousser

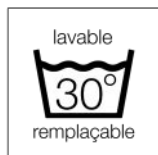

Ce fauteuil permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 2 boutons. Usage intérieur exclusif. **Le Starlev'II permet une aide au transfert debout par élévation de l'assise.**

Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables 30° permettant un allègement des points de pression.

Le STARLEV'II est un produit Français exclusif sur le marché, D.M. agréé par le CERAH.

caractéristiques :

hygiène	modules de couettes remplaçables, amovibles et lavables à 30°
modules de couettes	remplacement aisé en cas d'usure
composition de la couette	garnie fibre creuse siliconée pour un allègement des points de pression
assise	composée de mousse HR 35
positions	inclinaison électrique à 30° : Assise / Dossier / Repose jambes synchronisés. Fonction aide au transfert debout par élévation de l'assise
sécurité	Normes non-feu revêtement PVC/PU : M2 – 1021-1 – 1021-2 et biocompatible Normes non-feu revêtement Velours et Tissus : 1021-1 – 1021-2 et biocompatible. Velours galène 1021.1 uniquement
revêtements	velours déperlant, PVC/PU, tissus chiné
largeurs d'assise	38, 44, 50, 56 & 65 cm
hauteur sol / assise	48 cm
largeur hors tout	69 cm (T4), 72 cm (T7), 73 cm (T10), 79 cm (T13), 88 cm (T16)
options disponibles	câle-tête fabrication spéciale, appareil de soutien partiel de la tête, cale-tronc ajustable, harnais, kit batterie, assise Classe II, tablette latérale
poids maximum utilisateur	130 kg
poids du fauteuil	43 kg
garanties	fauteuil 2 ans - vérin 5 ans
franco à l'unité	oui
fabrication	France - région grand Est- Aube



FAUTEUIL STARLEV'II

dimensions en cm

largeurs d'assise	profondeurs d'assise	largeurs hors-tout	hauteur d'assise	hauteur hors-tout	poids du fauteuil	poids maxi utilisateur
380 mm 440 mm 500 mm 560 mm 650 mm	460 mm	690 mm 720 mm 730 mm 790 mm 880 mm	460 mm	1350 mm	43 kg	130 kg
tolérance dimensionnelle et pondérale + 15 mm / 1,5 kg						

utilisation de la télécommande 2 boutons



Les deux boutons permettent de bénéficier de la fonction AUTONOMIE électrique (avant/arrière), permettant de gérer soi-même son inclinaison.
Bouton BLANC : Avant
Bouton VERT : Arrière

aide à l'entretien

La couette de votre fauteuil est **amovible** et peut être **lavée en machine à 30°**. Nous vous conseillons lors du lavage de placer votre couette dans un filet à linge afin de conserver leur aspect d'origine. La durée de vie prévue du fauteuil est influencée par l'utilisation, le stockage, l'entretien et le nettoyage réguliers.

Afin de garder votre fauteuil INNOV'SA en bon état, **vous devez l'entretenir régulièrement** de la manière suivante :

- Contrôler et nettoyer les roues. Remplacer celles-ci si nécessaire.
- Vérifier la fixation des vis, les leviers, les boutons de réglage.
- Contrôler les freins.
- Contrôler le fauteuil (propreté fissures, dommages sur les pièces de structure, etc.) et nettoyer-le.
- Remplacer le revêtement si nécessaire.

LES COLORIS



PVC / PU imperméable

non-feu M2 

- 1- ebène
- 2- cacao
- 3- framboise



velours déperlant non-feu

EN 1021.1 & 1021.2 

- 4 - velours marron
- 5 - black édition
- 6 - galène (1021.1 uniquement)



tissus chinés non-feu

EN 1021.1 & 1021.2 

- 7 - gris chiné
- 8 - marron chiné

LES OPTIONS

câle-tête fabrication spéciale



appareil de soutien partiel de la tête



cale-tronc ajustable



harnais



assise Classe II



tablette latérale



kit batterie



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE

FABRICATION FRANÇAISE

INNOV'SA

18 rue Emile Coué CS 20888 – 10000 Troyes – France - Tel +33 (0)3 25 29 40 00 - www.innov-sa.com
document destiné aux professionnels de santé - photos non contractuelles - MAJ avril 2025 – V4NV